

VISIÈRE DE PROTECTION IMPRIMÉE EN 3D



Fiche produit

La visière de protection CTIBiotech est un équipement de protection individuelle conçu pour le personnel médical ainsi que les professionnels présentant un risque d'exposition au COVID 19. Ce produit est fabriqué uniquement à des fins de lutte contre l'infection au COVID 19 visant à renforcer la protection contre le virus en empêchant la projection de gouttelettes dangereuses sur le visage, en particulier sur les yeux. Il s'agit d'un produit réutilisable qui doit être nettoyé et entretenu en suivant les instructions mentionnées ci-dessous.

Description

- Visière de protection 3D individuelle.
- Transparent, flexible et robuste.
- Compatible avec les lunettes de sécurité, masque et charlotte de protection.
- Taille unique, ajustable.
- Réutilisable après nettoyage (voir Procédure de nettoyage et d'entretien).
- Non stérile.

Informations générales

- Dimensions du produit : H-15 cm x L-25 cm x I-19 cm.
- Bandeau frontal imprimé en 3D : PET-G recyclé, conforme aux normes ROHS et REACH.
- Visière détachable : PVC Cristal (transparent) – Souple - Non traité – Résistant à la buée – Épaisseur 300 microns – Réutilisable.
- Bande élastique réglable.
- Sparadrap ou rouleau de plastique pouvant être fixé (non fourni).

Réception et stockage

- Il est recommandé de recevoir les visières de protection imprimées 3D avec des gants et de procéder à un nettoyage (voir Procédure de nettoyage et d'entretien) avant l'utilisation. Note : tous les produits fabriqués sont traités avec une solution d'éthanol à 70% avant l'envoi.
- Conserver à température ambiante.
- Les visières de protection imprimées non utilisées doivent être placées et stockées dans un lieu différent afin d'éviter toute contamination croisée entre les articles.
- Après chaque utilisation, la procédure de nettoyage et d'entretien doit être effectuée avant le stockage.

Avertissements


La visière de protection imprimée en 3D ne remplace pas les mesures de protection, le masque chirurgical, les lunettes de sécurité ou d'autres dispositifs certifiés. Il est fortement recommandé de privilégier les équipements conformes aux recommandations de sécurité habituelles. Seuls les utilisateurs sont responsables de l'utilisation de ce produit. Il protège uniquement des micro-gouttelettes, la protection des autres projections (comme les réactifs chimiques, les fluides ou les solides) n'est pas garantie. Pour des raisons de sécurité, tenir à l'écart de la chaleur et des flammes.



Fabriqué en France

Procédure de nettoyage et d'entretien

- Cette procédure doit être réalisée lors de la réception, avant et après chaque utilisation.
- Matériel requis : Ethanol 70% et papier absorbant propre.

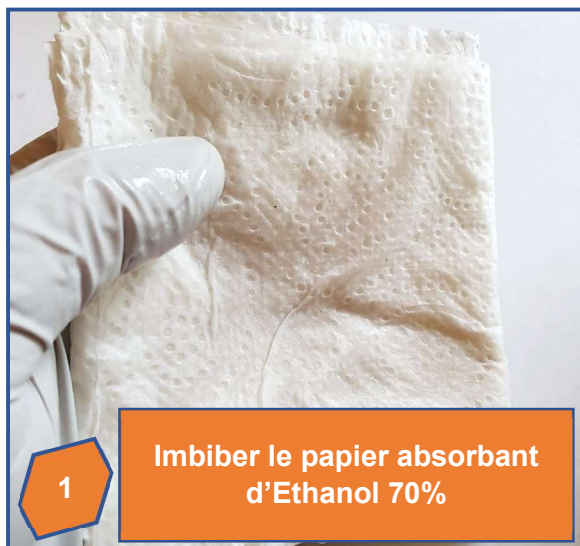

Remarque : si le serre-tête ne vous convient pas, vous pouvez l'attacher à l'arrière ou même utiliser votre propre élastique.

Informations complémentaires

Pour plus d'informations ou questions à propos de ce produit, merci de contacter CTI Biotech à l'aide des outils ci-dessous :

- Mail: office@ctibiotech.com
- Tél: +33 9 67 10 74 55